

医 03 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

## WiSM ニトリルグローブ ストリッチ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（ニトリルブダジエンゴム）を主材料とし、副材料に打粉を含まない（パウダーフリー）未滅菌の使い捨て形式の検査・検診用手袋である。

サイズ：SS、S、M、L

色：ブルー

### 【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋である。

### 【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出し装着する。

### 【使用上の注意】

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹などの症状がでる恐れがあるので、異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、必要に応じて医師に相談すること。

＜重要な基本的注意＞

1. 万一、包装が破損、汚損している場合や、製品そのものに異常（破損やピンホール等）などの異常が認められる場合は使用をしないこと。
2. 使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分すること。
3. 鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
4. 薬品や薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認して使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれに注意し、直射日光、高温、多湿を避けて保管すること。包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。

＜使用期限＞

包装の使用期限欄を参照してください。（自己認証により設定）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

ジェイソル・メディカル株式会社

＜製造業者＞

Hartalega NGC Sdn. Bhd.（マレーシア）